



ORDOLINE

Інструкції
для ретенційних
елейнів

Вітаємо із завершенням лікування за допомогою елайнерів Ordoline! Разом ми досягли чудових результатів!

Важливо розуміти, що зуби людини постійно зміщуються, тому після лікування необхідно підтримувати правильне положення зубів за допомогою ретенційних елайнерів. Ви знайдете ці елайнери в упаковці, і ми впевнені, що ви носитимете їх відповідально, щоб забезпечити стабільність результатів лікування.

Для досягнення найкращого результату рекомендуємо носити ретенційні елайнери за наступним графіком:

0 - 4
місяці



Носіть елайнери
по 22 години
на добу.

4 - 24
місяці



Носіть
елайнери
щоночі.

Після 24
місяців



Носіть
елайнери
одну ніч
на тиждень.

Рекомендації щодо використання елайнерів

- Починайте встановлювати елайнери з передніх зубів, поступово переходячи до задніх молярів.
- Під час зняття елайнерів починайте з задніх молярів і завершуйте передніми зубами.

Догляд за ретенційними елайнерами

Для належного догляду за ретенційними елайнерами важливо використовувати зубну щітку та пасту, які не містять абразивних речовин, таких як оксид алюмінію, карбонат кальцію або фосфат кальцію (ці речовини зазвичай присутні у відбілюючих зубних пастах). Під час очищення елайнерів промивайте їх під проточною теплою або холодною водою.

Догляд за ротовою порожниною

Для догляду за ротовою порожниною продовжуйте чистити зуби, як зазвичай, щіткою та зубною пастою, використовуйте міжзубну нитку.

Якщо ви втратили, пошкодили або деформували ретенційний елайнер, або якщо виникли пошкодження слизової оболонки ротової порожнини, ми рекомендуємо звернутися до вашого лікаря-стоматолога або медичного фахівця.

Категорично заборонено носити пошкоджені елайнери. У разі потреби ви також можете звернутися до виробника елайнерів — компанії Ordoline.

У разі серйозного інциденту, пов'язаного з пристроєм, повідомте про це як виробника, так і компетентний орган країни, де ви перебуваєте як користувач і/або пацієнт.

Ми заохочуємо вас поділитися своїм позитивним досвідом лікування, щоб надихнути та допомогти іншим прийняти рішення про початок лікування елайнерами Ordoline.

Ви можете зробити це, поділившись своїм досвідом у соціальних мережах і відмітивши @Ordoline. Здорова та красива усмішка справді може змінити життя, тож допоможімо іншим відкрити це також!

Для отримання інструкцій щодо використання знімних ортодонтичних ретейнерів Ordoline іншими мовами, скористайтеся наданим QR-кодом.



ORDOLINE
— — — — —





Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до статті 14 Загального регламенту захисту даних (далі-GDPR), повідомляємо, що контролером ваших персональних даних є ТОВ "Ordoline", код юридичної особи: 305610551; Адреса: вул. А. Вівульськю 7-202, Вільнюс, Литва. Вся інформація, передбачена статтею 14 GDPR щодо обробки ваших персональних даних, опублікована на веб-сайті Ordoline за посиланням: <https://ordoline.com/patient-privacy-policy/>

Дата перегляду інструкції:
2024-08-10

ТОВ Ordoline
Вул. А. Вівульського, 7-200
LT-03162 Вільнюс, Литва